

Mini alkohol tester

Prosíme prečítajte si dôkladne túto užívateľskú príručku aby ste produkt používali správne a používajte ho len v prísnom súlade s nižšie uvedenými pokynmi.

Funkcie tlačidla a rozhrania mini testera alkoholu

1. Otvor na fúkanie
2. LED kontrolka
3. Displej
4. Vypínač
5. Nabíjací port

V Európskej únii je koncentrácia alkoholu v krvi u vodičov obecné stanovená na 0,05%. Avšak v niektorých krajinách je táto hranica nižšia, ako napr. vo Švédsku, kde je 0,02%. Je dôležité poznamenať, že aj keď je koncentrácia alkoholu v krvi u vodiča nižšia ako stanovený limit, stále môže byť pod vplyvom a teda nebezpečenstvom na cestách. Jednotlivé EÚ krajiny tiež môžu mať špecifické zákony a pokuty za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, ktoré sa môžu líšiť štát od štátu.

Najbezpečnejšie je nešoférovať, ak ste pili, alebo si zorganizovať iný druh prepravy, ak plánujete piť. Môžete to riešiť napr. tým, že si dopredu určíte kto bude zo skupiny šoférovať, zoberiete si taxík alebo využijete prostriedky hromadnej dopravy. Robením zodpovedných rozhodnutí vieme všetci spolu zaistiť bezpečnosť na cestách.

Ako používať mini tester alkoholu

1. Stlačte vypínač na 2 sekundy. Po pípnutí sa zapne displej.
2. Následne sa zobrazí symbol „zohrievania“ a spustí sa odpočítavanie od 10. Poznámka: Ak tester dlhšiu dobu nepoužívate, povrch senzoru zoxидуje. Ak ho chcete znova použiť, alebo ho chcete použiť po prvý krát, musíte ho zohrievať aspoň 5 minút pred tým, ako ho použijete.

Testovacia metóda

1. Keď je mini tester alkoholu nahriaty, displej sa zmení a zobrazí „blow“ - fúkaj. Keď sa odpočítavanie zastaví na 0, začnite fúkať do testera.
2. Keď začnete fúkať do testera, začne analyzovať Váš dych. Fúkajte až pokým sa nezvzbučia.
3. Na displeji sa zobrazí výsledok testu.
4. Ak je výsledok testu koncentrácie alkoholu 0,00% alebo 0,0 g/l, znamená to, že tester nezachytil žiaden alkohol vo Vašom dychu a kontrolka sa rozsvieti na zeleno. Ak je výsledok testu koncentrácie alkoholu viac ako 0,01% alebo 0,1 g/l, zobrazí varovanie sprevádzané pípnutím a kontrolka sa rozsvieti na žltó. Ak je výsledok testu koncentrácie alkoholu viac ako 0,08% alebo 0,8 g/l, zobrazí sa „Danger“ - pozor, sprevádzané rýchlym pípaním a kontrolka sa rozsvieti na červeno.

Preventívne opatrenia

1. Test koncentrácie alkoholu odporúčame robiť najskôr 20 minút po tom, ako ste pili, aby bol čo najpresnejší, keďže trvá približne 20 minút, pokým je alkohol absorbovaný z tráviaceho systému do krvi. Testovanie hneď po vypití alkoholu zmeria len koncentráciu alkoholu v ústach a nie koncentráciu alkoholu v krvi.

2. Neumývajte mini tester alkoholu chemikáliami alebo rozpúšťadlami, ktoré majú korozívne vlastnosti aby ste predišli tomu, že sa tekutine dostane do otvoru na fúkanie.
 3. Mini tester alkoholu nebude fungovať správne ak je v prostredí vysoká koncentrácia rušivých plynov.
 4. Ak sa test robí keď je baterka slabá, môže to mať negatívny vplyv na výsledok testu.
 5. Je zakázané skladovať alebo používať mini tester alkoholu v uzavretom prostredí so žieravými plynmi alebo znečistením vzduchu ako napr. farbami, pesticídmi, alkoholom, atď.
 6. Zabráňte tomu, bol mini tester alkoholu spadol na zem, bol stlačený, prudko sa s ním triaslo a iným intenzívnym aktivitám.
7. Aby ste dosiahli presnejší výsledok testu, odporúčame zopakovať test 2 až 3-krát.

Vyhlásenie

Šoférovať opitý je vážny priestupok, ktorý môže mať život-meniace následky. Náš mini tester alkoholu je navrhnutý tak, aby Vám pomohol zistiť Vašu hladinu alkoholu v krvi pred tým, ako si sadnete za volant. Použitím nášho mini testera alkoholu môžete prebrať zodpovednosť sa svoje konanie a urobiť správne rozhodnutie aby ste sebe ani ostatným neublížili. Pamätajte, že šoférovať opitý nikdy za to nestojí, takže dbajte na bezpečnosť a vždy robte zodpovedné rozhodnutia.

Špecifikácie produktu

- Rozmery produktu: 81 x 11 x 25mm
- Celková váha: 23g
- Senzor: Vysoko senzitívny senzor alkoholu s priamym ohrevom
- Rozsah testu: 0,00 - 0,19% / 0,0 / 1,9 g/l
- Napájanie: DC 5V
- Doba zohrievania: 10 sekúnd
- Doba fúkania: do 10 sekúnd
- Odozva: do 5 sekúnd
- Automatické vypnutie: 10 sekúnd po zobrazení výsledku testu
- Pracovné prostredie: 0 °C - 45 °C

Chyba	Možná příčina	Riešenie
Nezapne sa	Vybitá baterka	Nabiť baterku
Žiadna reakcia pri fúkaní	Nie plne zohriaty	Pred použitím zohrejte tester aspoň 5-krát
Výsledok sa nezobrazí	V testeri je zvyškový plyn	Znova tester zohrejte
Výsledok bez fúkania	V testeri je zvyškový plyn	Tester zohrejte aspoň 5-krát
Niekoľko testov s rôznymi výsledkami	Testujete hneď po pití	Test urobte najskôr 20 minút po pití